


คู่มือการใช้งานเครื่องปั๊มนม ยูนิมอม มีนิวเอท LCD

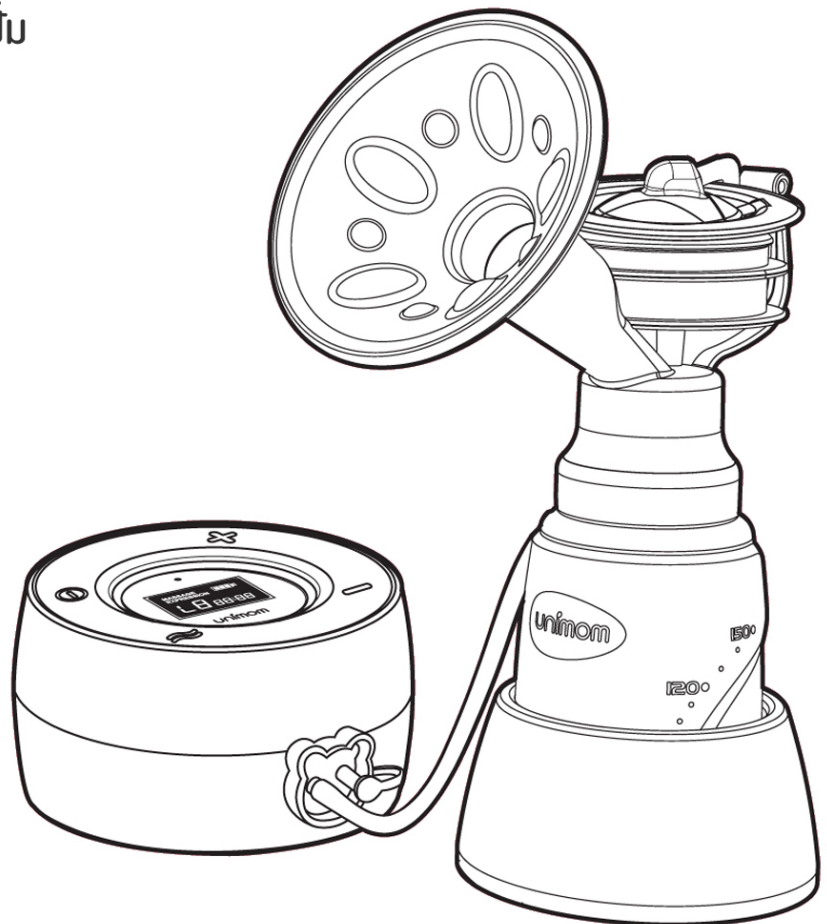

Minuet *LCD* Double Electric Breast Pump

- ✓ LCD Display
- ✓ Comfort Phase (โหมดนวดกระตุ้น/โหมดปั๊ม)
- ✓ นวดเต้าอย่างนุ่มนวลในขณะปั๊ม
- ✓ กรวยปั๊มระบบปิด 360 องศา
- ✓ เสียงเบาและพกพาสะดวก
- ✓ แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ
- ✓ ปรับแรงดูดได้ตามต้องการ



Save these instructions



LOVE YOUR BABY WITH UNIMOM
ELECTRIC BREAST PUMP

เครื่องปั๊มน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนบุคคล
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับบุคคลอื่น อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายถึงชีวิตจากไฟฟ้าช็อต โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้


1. ถอดปลั๊กทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
2. ห้ามใช้ในระหว่างอาบน้ำ
3. ห้ามสัมผัสเครื่องในกรณีที่เครื่องตกลงไปในน้ำ หากเครื่องตกน้ำ ให้ถอดปลั๊กทันที

ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ หากไม่ได้ใช้งาน
2. ควรระมัดระวังในการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำนม หากต้องใช้งานใกล้กับเด็กหรือทารก
3. ควรใช้เครื่องปั๊มน้ำนมนี้กับอุปกรณ์ตามที่ระบุในคู่มือนี้เท่านั้น
4. ควรใช้เครื่องปั๊มน้ำนมตามคำอธิบายในคู่มือเท่านั้น ไม่ควรใช้งานอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้
5. ไม่ควรใช้งานเครื่องปั๊มน้ำนมนี้ในกรณีที่ชำรุด หรือมีการทำงานที่ผิดปกติ หรือกรณีที่ชำรุดจากการทำตก หล่น หรือตกหล่นลงไปในน้ำ
6. ควรเก็บรักษาเครื่องปั๊มน้ำนมให้ห่างจากความร้อน
7. ไม่ควรใช้เครื่องปั๊มน้ำนมขณะง่วงนอนหรือสับสน
8. หากไม่ได้ใช้งาน ให้ถอดสายไฟออกจากตัวเครื่อง
9. ห้ามถอดชิ้นส่วน หรือดัดแปลงตัวเครื่อง
10. ห้ามใช้งานเครื่องปั๊มน้ำนมในบริเวณที่มีการใช้ก๊าซออกซิเจนหรือสเปรย์
11. คลายแรงดูดของเครื่องปั๊มน้ำนม ด้วยการสอดนิ้วแทรกระหว่างกรวยปั๊มและทรงอก
12. หากรู้สึกเจ็บหลังจากใช้เครื่องปั๊มนม ให้หยุดปั๊ม เพราะอาจทำให้หัวนมบวม

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1. ใช้ปั๊มน้ำนม เพื่อบรรเทาอาการคัดเต้านม
2. ใช้ปั๊มเพื่อเก็บน้ำนมแม่ในกรณีที่ต้องการป้อนลูกด้วยวิธีอื่น เช่น ใช้ขวดนมหรือถ้วยป้อนนม

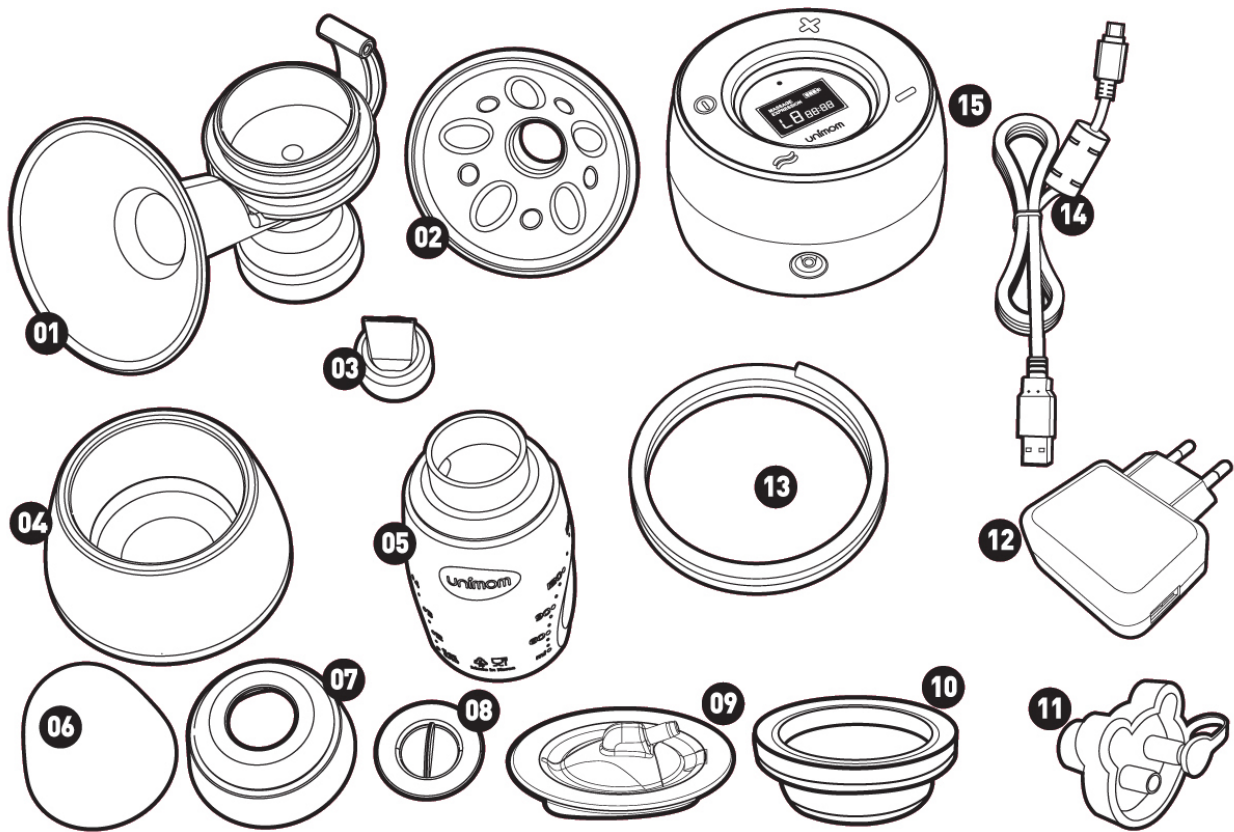


Parts Guide

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 01 กรวยปั๊ม | 02 ซิลิโคนเสริมกรวยปั๊ม | 03 วาล์วสีขาว | 04 ฐานรองขวดนม |
| 05 ขวดนม | 06 ฝาครอบจุกนม | 07 ฝาปิดขวดนม | 08 Disk |
| 09 ฝาครอบไดอะแฟรม | 10 ไดอะแฟรม K-Pop | 11 ตัวต่อสายปั๊ม | 12 USB อะแดปเตอร์ |
| 13 สายปั๊ม | 14 สายชาร์จ | 15 มอเตอร์ | |

Operating Instructions

- 01 ปุ่ม เปิด/ปิด
- 02 ปุ่มเปลี่ยนโหมด
- 03 ปุ่มลดแรงดูด
- 04 ปุ่มเพิ่มแรงดูด
- 05 ไฟ LED
- 06 หน้าจอ LCD

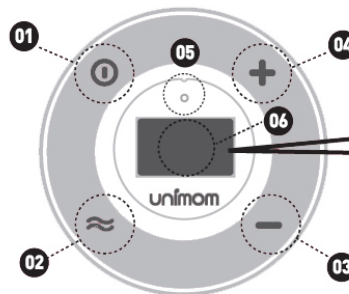

โหมดนวดกระตุ้น




โหมดปั๊ม

ไฟ LED

- ไฟนี้จะติดในระหว่างชาร์จ และจะดับเมื่อชาร์จเต็ม

จอ LCD

- Massage แสดงการทำงานของโหมดนวดกระตุ้น ตั้งแต่ระดับ P1-P7
- Expression แสดงการทำงานของโหมดปั๊ม ตั้งแต่ระดับ L1-L9

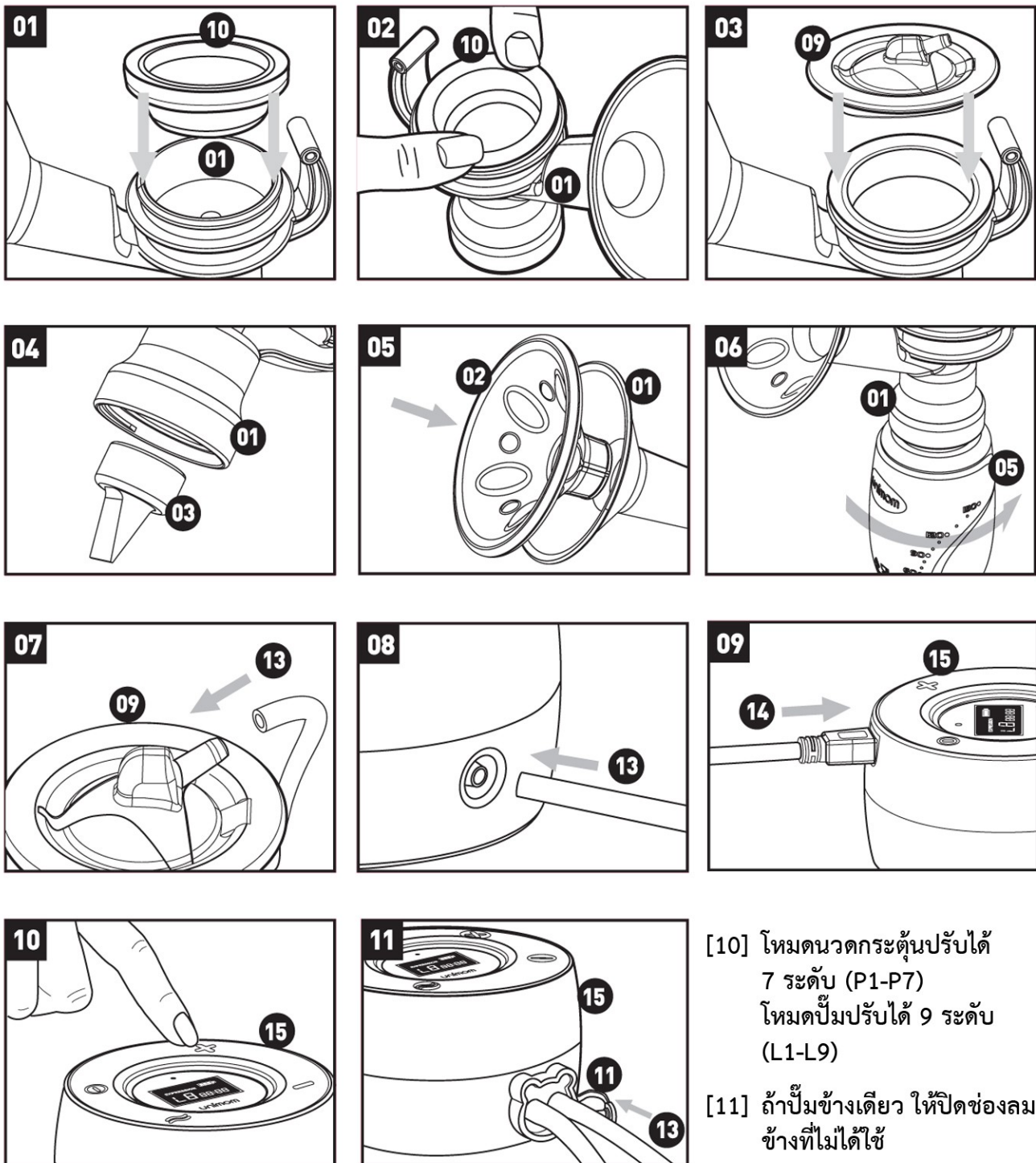

หมายเหตุ: ซิลิโคนเสริมกรวยปั๊มได้รับการออกแบบมาสำหรับการนวดกระตุ้นทรงอกในระหว่างปั๊มนม เพื่อช่วยกระตุ้นกลไกการหลั่งน้ำนม และเพิ่มความนุ่มสบายในการปั๊ม การใช้ซิลิโคนนี้ร่วมกับกรวยปั๊ม อาจทำให้แรงดูดของเครื่องลดลง ถ้าน้ำนมออกมากจนไหลเข้าไปข้างในซิลิโคน ให้ถอดซิลิโคนออก และปั๊มโดยไม่ต้องใช้ซิลิโคน

1. ประกอบชุดกรวยปั๊มตามคำแนะนำในหน้า 4
2. สวมกรวยปั๊มเข้ากับหน้าอก โดยให้หัวนมอยู่กึ่งกลางกรวยปั๊ม แล้วเปิดสวิตช์เครื่องปั๊มนม
3. ปั๊มกระตุ้นประมาณ 2 นาทีแล้วกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนโหมด กดปุ่ม +/- เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดูดตามต้องการ
4. กดปุ่มปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จแล้ว

คำแนะนำ: - โปรดล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งานเครื่องปั๊มนม
ข้อควรระวัง: - ไม่ควรบรรจุน้ำนมในขวดเกินกว่าปริมาตรที่ระบุ
- ไม่ควรนำชุดกรวยปั๊มไปแช่ในช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ

การชาร์จแบตเตอรี่

- * เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวเครื่อง ระหว่างชาร์จจะมีไฟติด เมื่อชาร์จเต็มไฟจะดับ
- * ระยะเวลาในการชาร์จเต็มประมาณ 1 ชม. 45 นาที สามารถใช้งานได้ประมาณ 2 ชม. 30 นาที ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง

การเก็บรักษาน้ำนมแม่และการนำออกมาใช้

- * ณ อุณหภูมิห้อง : 6 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิสูงสุด 25 °C
- * ภายในตู้เย็น : 5 วัน ณ อุณหภูมิสูงสุด 4 °C
- * ภายในช่องแช่แข็งตู้เย็นที่มีประตูแยก : 3-6 เดือน
- * ภายในตู้แช่แข็ง : 6-12 เดือน ณ อุณหภูมิ -20 °C

การอุ่นน้ำนมแช่แข็ง: น้ำนมที่แช่แข็งแล้วสามารถละลายได้ภายในหนึ่งคืน เมื่อทิ้งไว้ในตู้เย็นช่องปกติ หรือจากปล่องไฟละลายโดยให้น้ำเย็นไหลผ่าน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิของน้ำเพื่ออุ่นน้ำนมให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับป้อนทารก

การอุ่นน้ำนมแช่เย็น: น้ำนมที่แช่เย็นสามารถอุ่นได้โดยแช่ในน้ำอุ่นสักครู่ ก่อนที่จะป้อนทารก คุณแม่ต้องทดสอบอุณหภูมิของน้ำนมก่อนเสมอโดยการหยดน้ำนมลงบนข้อนิ้ว อย่าให้ร้อนเกินไป

- * ห้ามอุ่นน้ำนมบนเตาโดยตรง ห้ามละลายน้ำนมในน้ำร้อนหรือน้ำเดือด
- * ห้ามอุ่นน้ำนมในไมโครเวฟ การอุ่นน้ำนมในไมโครเวฟจะทำให้องค์ประกอบในน้ำนมเปลี่ยนแปลง และอาจทำให้เกิดความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจลวกปากทารกได้
- * ไม่ควรนำน้ำนมที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งใหม่ น้ำนมที่ละลายแล้วและไม่ได้ใช้เกินกว่า 24 ชม. ให้ทิ้ง

สิ่งสำคัญที่สุดในการปั้มน้ำนมให้ได้สำเร็จก็คือ กลไกการหลั่งน้ำนม ซึ่งทำให้เกิดการหลั่งน้ำนมได้อย่างอิสระ แนวทางการปฏิบัติต่อไปนี้จะสามารถช่วยให้กลไกการหลั่งน้ำนมเกิดได้ง่ายขึ้น

- * นวดคลึงเต้านมก่อนการปั๊ม โดยการใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือสัมผัสหัวนมเบาๆ เพื่อกระตุ้นกลไกการหลั่งน้ำนม
- * เลือกสถานที่ปั้มนมที่เป็นที่ส่วนตัวและไม่ถูกรบกวน
- * เลือกเก้าอี้ที่หนุนด้านหลัง และอาจมีที่รองเท้าเพื่อความสบายในระหว่างปั้มนม
- * ผ่อนคลายด้วยการนึกถึงลูกน้อยหรือดูภาพลูกน้อยของคุณ
- * คุณแม่บางท่านพบว่ากลไกการหลั่งน้ำนมจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแม่ได้ยินเสียงลูกน้อยร้องไห้หรือได้ยินเสียงทารกอื่นร้องไห้

ควรจำไว้เสมอว่าการปั้มน้ำมนั้นเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ปริมาณน้ำนมมากหรือน้อยเป็นไปตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน การปั้มน้ำนมออกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมและช่วยรักษาปริมาณน้ำนมเอาไว้ได้

ในกรณีที่รู้สึกไม่สบายหรือเจ็บเต้านมในระหว่างใช้เครื่องปั้มน้ำนม ให้ลดระดับแรงดูด หรือลองปั้มน้ำนมโดยใช้หรือไม่ใช้ซิลิโคนเสริมกรวยปั๊ม หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ปิดเครื่องปั้มน้ำนมและถอดกรวยปั๊มออกจากเต้านม พักสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วลองใหม่อีกครั้งเมื่ออาการคัดเต้านมลดลง หากยังไม่รู้สึกดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

เคล็ดลับการเพิ่มปริมาณน้ำนม :

- * การปั้มน้ำนมบ่อยๆ ให้ผลในการเพิ่มปริมาณน้ำนมมากกว่าปั๊มครั้งละนานๆ
- * การปั้มนมพร้อมกันสองข้างช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมและเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ดีกว่าการปั๊มทีละข้าง
- * ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ บ่อยๆ ตลอดทั้งวัน ถ้าปัสสาวะเป็นสีใสแสดงว่าดื่มน้ำเพียงพอ ถ้าไม่ใสแสดง

- * หลังใช้งานทุกครั้ง ให้ล้างอุปกรณ์ปั้มน้ำนม (ยกเว้นตัวมอเตอร์) ด้วยน้ำยาล้างขวดนม ถ้าจำเป็นสามารถต้มด้วยน้ำเดือด หรือหนึ่งด้วยเครื่องนึ่งขวดนมได้ หลังล้าง ผึ่งให้แห้ง แล้วคลุมด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้แปรงทำความสะอาดวาล์วสีขาว
- * เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องนึ่งหรือต้มอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ การล้างด้วยน้ำยาล้างขวดนมธรรมดาาก็เพียงพอแล้ว การต้มหรือหนึ่งด้วยความร้อนสูงบ่อยๆ จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- * หากจำเป็นต้องทำความสะอาดตัวเครื่อง ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเพื่อทำความสะอาด

ปัญหาที่เกิดขึ้น	สาเหตุ	ตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
แรงดูดน้อย หรือ ไม่มีแรงดูด	สวิทช์ปิดเปิด	ตรวจสอบว่า สวิทช์เปิดอยู่หรือไม่	ถ้าสวิทช์เปิดอยู่ แต่เครื่องไม่ทำงานให้ติดต่อผู้ขาย
	A/C Adapter	ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้ากับปลั๊กหรือไม่	เสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อย
	Battery	ระดับไฟอยู่ในระดับต่ำหรือไม่	ถ้าไฟอยู่ในระดับต่ำ ให้เสียบ adapter เพื่อชาร์จไฟ
	ประกอบชุดกรวยปั๊มไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบชุดกรวยปั๊ม	ถอดชิ้นส่วนออกแล้วประกอบใหม่ให้ถูกต้อง
	วาล์วสีขาว	ตรวจสอบว่าฉีกขาดหรือไม่	เปลี่ยนวาล์วใหม่
รู้สึกเจ็บในขณะปั๊มนม	แรงดูดสูงเกินไป	ตรวจสอบระดับแรงดูด	ปรับแรงดูดให้ต่ำสุด แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นให้อยู่ในระดับที่ต้องการ หากยังเจ็บอยู่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชิ้นส่วนชำรุดหรือสูญหาย : สามารถซื้ออะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือสูญหายได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Unimom ที่ท่านซื้อ หรือติดต่อบริษัท

1. เมื่อต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกำจัดและทิ้งขยะของท้องถิ่น
2. การกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น บริษัทขอรับประกันเครื่องปั้มน้ำนมไฟฟ้า Unimom Minuet เป็นระยะเวลา 12 เดือน สำหรับมอเตอร์ และ 6 เดือน สำหรับแบตเตอรี่ (ไม่รวมอุปกรณ์ปั้ม) นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขาย การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้ซื้อคนแรกขายหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำนมไฟฟ้านี้ให้ผู้อื่น

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตกหล่น การใช้งานผิดประเภท การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ หรือใช้ไฟผิดขนาด

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้น บริษัทยินดีที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัท) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นของ Unimom เท่านั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของ Unimom จะทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะทันที

Hot
Line

เครื่องปั้ดปกติ

080-262-5727

083-996-5530

ปั้มได้น้อย นมไม่พอ

090-974-5503

082-003-9068

คลินิกนมแม่

- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02-419-7000 ต่อ 5995
- * คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ โทร.02-354-8333 ต่อ 502
- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-289-7000 ต่อ 7134 (จ-ศ) ต่อ 7130 (ส.-อา.)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท มัสกา จำกัด

154 ถนนร่มเกล้า ซอย 24 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-543-9322, 02-915-2277

www.unimomfamily.com