



คู่มือการใช้

เครื่องปั๊มน้ำนมอัตโนมัติ

รัมเบิล ทัฟฟ์ รุ่น บรีซ

Breeze

Electric Breast Pump Duo
Instructions & Assembly



Model: PA209

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกใช้เครื่องปั้มน้ำนม Rumble Tuff Breeze สำหรับตัวคุณและลูกน้อย เครื่องปั้มน้ำนมนี้เหมาะกับการใช้งานในหลาย ๆ โอกาส ดังนี้

- เก็บน้ำนมของคุณแม่ในเวลาที่ต้องอยู่ห่างจากลูกน้อย
 - * เช่นเวลาที่คุณแม่ต้องไปทำงาน
- บรรเทาอาการการคัดเต้านมของคุณแม่
 - * เช่นในช่วงที่ลูกน้อยเปลี่ยนพฤติกรรมการดูดนม เนื่องจากได้รับอาหารเสริมมากขึ้น
- รักษาปริมาณน้ำนมของคุณแม่ไม่ให้ลดลงในยามที่คุณแม่จำเป็นต้องหยุดให้ลูกดูดนมชั่วคราว
 - * เช่นในกรณีที่คุณแม่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ซึ่งมีผลต่อน้ำนม

เครื่องปั้มน้ำนม Rumble Tuff Breeze มีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่คุณแม่ต้องชื่นชอบ

- ระบบ 3 cycle of expression ซึ่งเลียนแบบจังหวะการดูดนมของลูกน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ
 - * โหมดกระตุ้นแบบรีเฟล็กซ์ - เลียนแบบลักษณะการเข้าเต้าหาหัวนม
 - * โหมดกระตุ้นแบบรวดเร็ว—เลียนแบบการดูดกลืนแบบตื้นๆ และเร็ว
 - * โหมดปั้มนกตึแบบธรรมชาติ - เมื่อน้ำนมเริ่มหลั่ง เลียนแบบการดูดกลืนแบบแรงแต่ช้าๆ
- ชุดปั้มน้ำนมเป็นแบบระบบปิด ป้องกันเชื้อโรคและการปนเปื้อนในน้ำนม
- การทำงานของมอเตอร์ที่ไม่ส่งเสียงดัง
- มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
- สามารถเลือกใช้แหล่งพลังงานได้ตามความต้องการของคุณแม่ ดังนี้
 - * ใช้ไฟบ้านผ่าน AC Adapter
 - * ใช้ถ่านลิเธียมไอออนที่มากับเครื่องและชาร์จซ้ำได้
- สามารถปรับเป็นปั้มนวดปั้มน้ำนมด้วยมือได้ภายในไม่กี่วินาที (มีชุดอุปกรณ์ให้)

ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน

เครื่องปั้มน้ำนม Rumble Tuff ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานส่วนบุคคล เพื่อใช้ปั้มน้ำนมสำหรับหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร และผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล

สารบัญ

ขอแสดงความยินดี	2
ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน	2
ข้อควรระวัง	5
• อันตราย	5
• ค่าเตือน	5
ส่วนประกอบต่างๆ	6
• อุปกรณ์ที่ให้มาด้วยและอุปกรณ์เสริม	6
• ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมัน	7
วิธีประกอบชุดกรวยปั๊มและขวดนม	8
ขั้นตอนการทำความสะอาดชุดอุปกรณ์	13
• การฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานครั้งแรก	13
• การทำความสะอาดก่อนการใช้งานทุกครั้ง	13
• ข้อเสนอแนะการทำความสะอาดทั่วไป	13
• ข้อเสนอแนะการทำความสะอาดสายปั๊ม	14
คำอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับปั๊มไฟฟ้า Rumble Tuff Breeze	15
• มอเตอร์	15
• หน้าจอ LCD	15
• วิธีการใช้งานเครื่องปั๊มไฟฟ้า Rumble Tuff Breeze	16
• ระดับแรงดูด	18
• ปุ่ม M (My Favorite Pattern)	19
• วิธีการตั้งนาฬิกา	20
• วิธีการตั้งเวลาเตือน	21
แหล่งจ่ายไฟ	22
• การใช้ AC Adapter (ที่มากับผลิตภัณฑ์)	22
• การใช้ถ่านลิเทียมไอออนที่มากับตัวเครื่องปั๊ม	23

ส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ปั๊มมือ	24
• วิธีประกอบชุดอุปกรณ์สำหรับปั๊มมือ	24
การใช้งานที่ปั๊มด้วยมือ	26
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	27
• กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	27
• ปัญหาพลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ	27
• แรงดูดตก	27
• ไม่มีการตอบสนองเมื่อปรับหมุนปุ่ม	27
• เครื่องปั๊มไม่ทำงานขณะที่เปิดสวิตช์แล้ว	28
• น้ำนมไหลเข้าไปสะสมในส่วนลำตัวของกรวยปั๊ม	28
• สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมและอะไหล่ได้ที่ไหน	28
การรับประกัน	29
ข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่อง	30
• พลังงาน	30
• คุณสมบัติทางเทคนิค	30
• สัญลักษณ์ต่างๆ	30
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	31

ข้อควรระวัง

เครื่องปั้มน้ำ Rumble Tuff ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

โปรดอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

อันตราย:


เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้า :

- ควรถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
- ไม่ควรใช้เครื่องปั้มน้ำในขณะอาบน้ำ
- ไม่ควรวางหรือเก็บเครื่องปั้มน้ำไว้ในที่ที่อาจจะตกหรือหล่นลงไปในน้ำ
- ไม่ควรวางหรือทำเครื่องปั้มน้ำหล่นลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- ไม่ควรหยิบหรือจับเครื่องปั้มน้ำเมื่อหล่นลงในน้ำ แต่ควรถอดปลั๊กทันที


คำเตือน:

- ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องปั้มน้ำทิ้งไว้ หากไม่ได้ใช้งาน
- เก็บเครื่องปั้มน้ำให้ห่างจากมือทารกและเด็กเล็ก ระวังเด็กๆ เล่นและกลืนชิ้นส่วนเล็กๆ ของเครื่องปั้มน้ำและอุปกรณ์ปั้มน้ำ
- ไม่ควรใช้งานเครื่องปั้มน้ำนี้ในกรณีที่สายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือมีการทำงานที่ผิดปกติ หรือกรณีที่ชำรุดจากการทำตกหล่น หรือตกหล่นลงไปในน้ำ
- ควรเก็บรักษาสายไฟให้ห่างจากความร้อน
- ไม่ควรใช้เครื่องปั้มน้ำขณะง่วงนอนหรือสับสน
- ห้ามสอดใส่วัตถุใด ๆ ลงไปในช่องใดๆ หรือสายปั้มน้ำของเครื่องปั้มน้ำ
- ห้ามใช้เครื่องปั้มน้ำภายนอกอาคาร หรือในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์หรือในที่ที่มีการใช้งาน ออกซิเจน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้า (voltage) ของ AC Adapter ตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ใช้
- เสียบ AC Adapter เข้ากับเต้าเสียบก่อน แล้วจึงเสียบสายไฟเข้ากับเครื่องปั้มน้ำ
- ใช้ AC Adapter หรือแบตเตอรี่ Li-Ion ที่มากับเครื่องปั้มน้ำเท่านั้น หากใช้ปลั๊ก AC/DC Adapter อื่นๆ จะทำให้การรับประกันสิ้นสุด
- ในกรณีที่คุณแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือเชื้อ HIV เครื่องปั้มน้ำนี้ไม่สามารถป้องกันหรือกำจัดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากคุณแม่สู่ลูกได้
- ล้างชุดอุปกรณ์เก็บน้ำนมทุกชิ้นก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามขับขี่ยานพาหนะขณะที่ปั้มน้ำ
- ควรใช้เครื่องปั้มน้ำตามคำอธิบายในคู่มือเท่านั้น ไม่ควรใช้งานอื่นๆ นอกเหนือที่กำหนดไว้
- ห้ามปรับเปลี่ยนแก้ไขผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบต่าง ๆ (อุปกรณ์ที่ห้มาด้วยและอุปกรณ์เสริม)

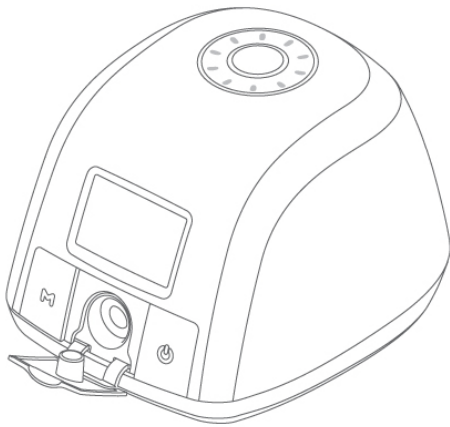

เครื่องปั๊ม

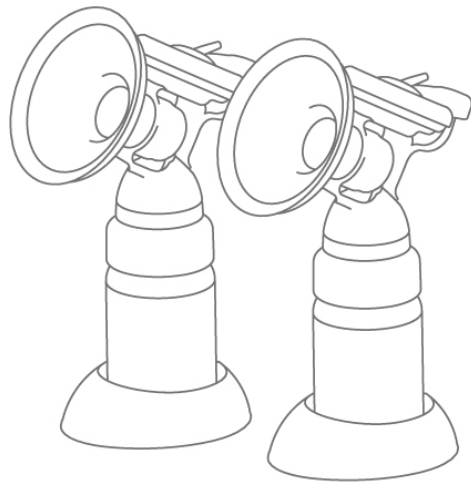


ชุดกรวยปั๊มพร้อมขวดเก็บน้ำนม
(2 ชุด)




คั่นโยกพร้อมไดอะแฟรม



ฝาปิดขวดนม (2 ชุด)

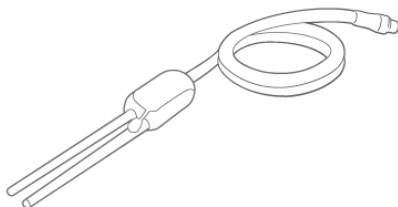


สายปั๊ม

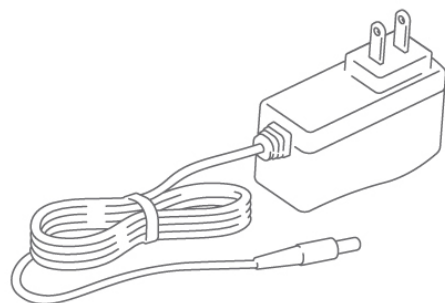

AC/DC อแดปเตอร์

ส่วนประกอบต่าง ๆ (ชุดอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำนม)

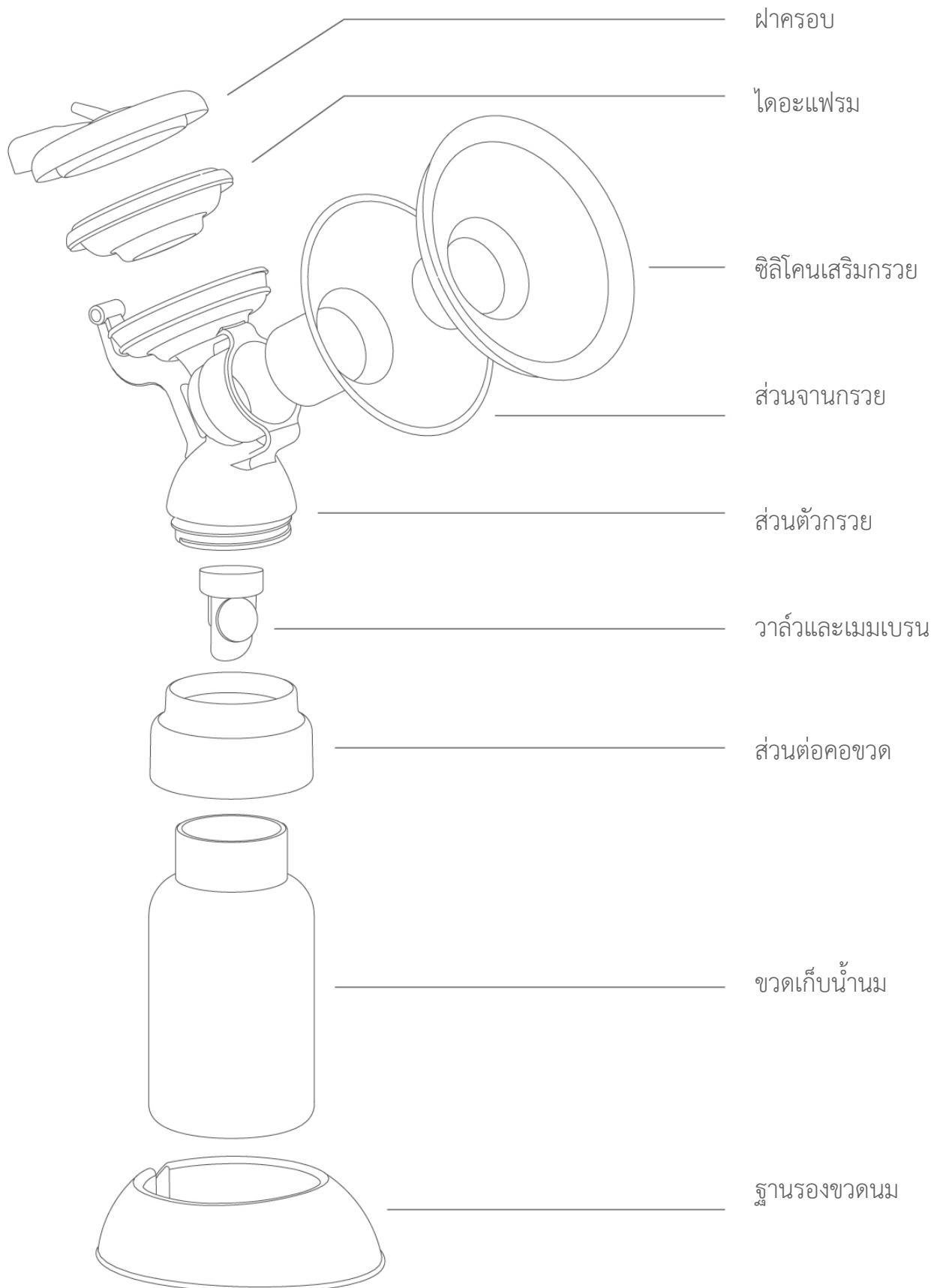


การประกอบชุดกรวยบีบและขวดนม



จับส่วนตัวกรวยหงายด้านที่ต่อกับขวดขึ้น




สวมวาล์วพร้อมเมมเบรนเข้าด้านในตัวกรวย

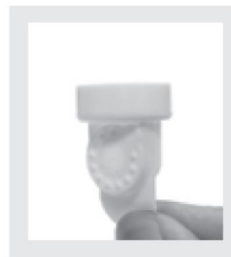


แผ่นเมมเบรนต้องแนบสนิท
ไม่โค้งงอ เพราะจะทำให้แรงดูด
ลดลง

วิธีประกอบแผ่นเมมเบรนเข้ากับตัววาล์ว

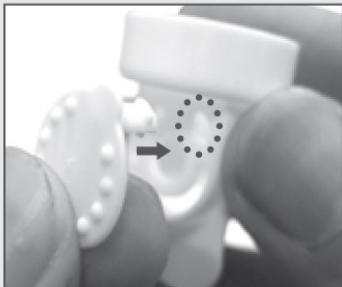

ติดแผ่นเมมเบรนเข้ากับ
วาล์ว โดยกดส่วนก้าน
เข้าไปในช่องมุมบนขวา

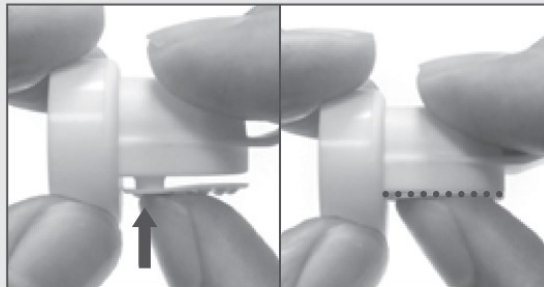

กดแผ่นเมมเบรนให้แนบสนิท




วาล์วที่ประกอบ
เสร็จแล้ว




ตรวจสอบว่าวาล์วประกอบเข้ากับกรวย
เรียบร้อยแล้ว

การประกอบชุดกรวยปั๊มและขวดนม

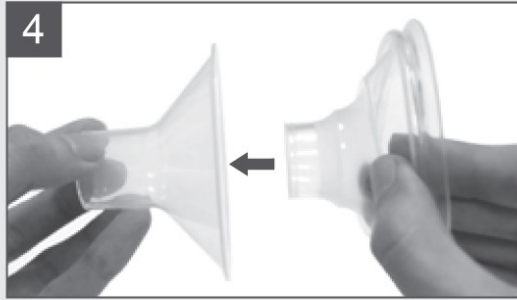

ถ้าต้องการ สวมซิลิโคนลงจานกรวย

คำแนะนำ: ซิลิโคนนี้ช่วยให้แรงดูดเบาลง สำหรับคุณแม่ที่อาจจะรู้สึกเจ็บในขณะที่ปั๊ม หากปั๊มโดยไม่ใช้ซิลิโคนแล้วรู้สึกปกติดี ก็ไม่จำเป็นต้องใช้

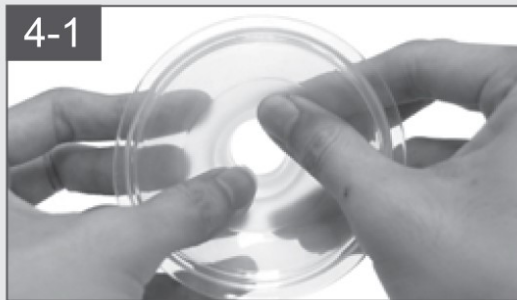


จับซิลิโคนให้อยู่กึ่งกลางจานกรวย



ยึดขอบของซิลิโคนเข้ากับขอบกรวยให้แน่นสนิทโดยรอบ



ตรวจสอบว่าขอบซิลิโคนครอบกรวยได้เรียบร้อยทุกด้าน

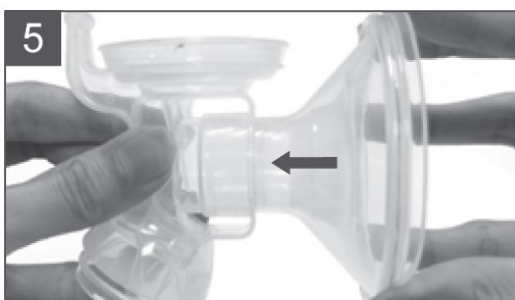

ประกอบส่วนจานกรวยเข้ากับตัวกรวย

การประกอบชุดกรวยบีบและขวดนม



สวมไดอะแฟรมเข้ากับด้านบนส่วนตัวกรวย




คำเตือน: ห้ามสวมฝาครอบ (8) ก่อนสวมไดอะแฟรม เพราะจะทำให้แรงดูดลดลง




กดขอบไดอะแฟรมให้สนิทโดยรอบ



ไดอะแฟรมที่ประกอบเรียบร้อยแล้วกับส่วนตัวกรวย

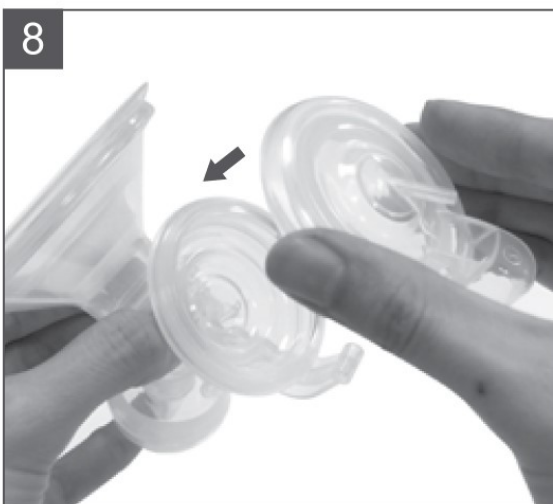

สวมฝาครอบทับด้านบนไดอะแฟรมที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว

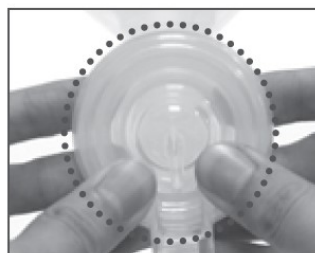


กดให้แน่นสนิท โดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาครอบทับแกนด้านหลัง



ชุดกรวยที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว


การประกอบชุดกรวยบีบและขวดนม

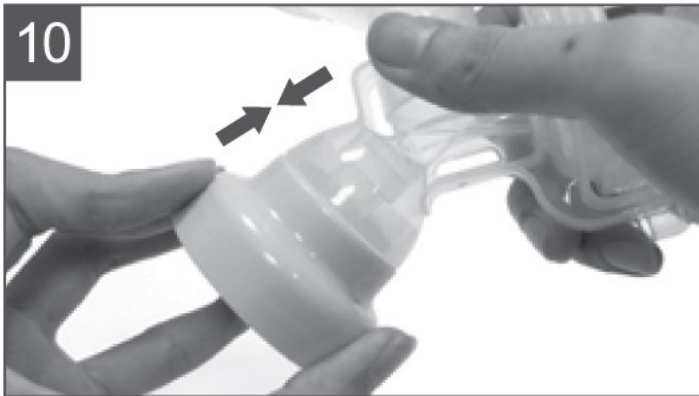

หมุนข้อต่อขวดนมเข้ากับชุดกรวย



ต่อขวดนมเข้ากับข้อต่อ

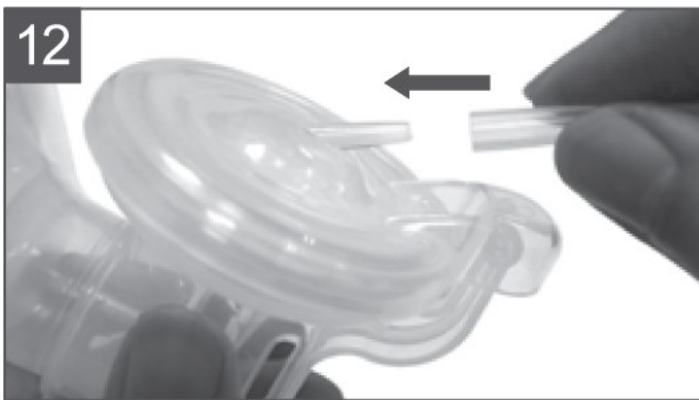

เสียบสายปั๊มเข้ากับช่องลมด้านบนของ
ฝาครอบ

คำเตือน: สายปั๊มต้องแห้งสนิท และไม่มี
ความชื้น

การประกอบชุดกรวยปั๊มและขวดนม




เสียบสายให้แน่นสนิท



ชุดกรวยปั๊มพร้อมขวดนมที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนจากปั๊มพร้อมกันสองข้างเป็นปั๊มข้างเดียว
ถอดสายปั๊มออกข้างหนึ่ง แล้วปิดจุกลมด้านที่ไม่มีสาย

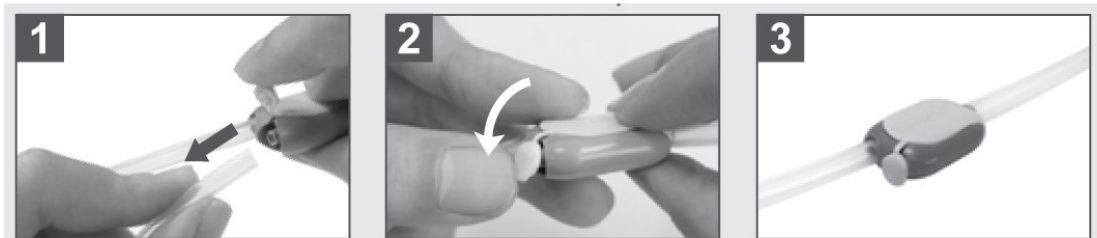

ถอดสายด้านที่มีฝาปิดออก ปิดจุกลมตรงที่ถอดสายออก สายที่พร้อมใช้งาน



สแกน QR Code เพื่อดู vdo การประกอบชุดกรวยปั๊มและขวดนม
Rumble Tuff ได้บนโทรศัพท์มือถือ หรือได้ที่ www.rumbletuff.com

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์

การฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานครั้งแรก:

ก่อนการใช้งานเครื่องปั้มน้ำนม Rumble Tuff ครั้งแรกนั้น ให้ถอดชุดอุปกรณ์การปั้มน้ำนม และชุดไดอะแฟรมทุกชิ้น (ยกเว้นสายปั้ม) ออกก่อน แล้วนำไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 10 นาที

- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณน้ำเพียงพอต่อการต้มอุปกรณ์ทุกชิ้น
- * **ห้ามต้มสายปั้ม หรือข้อต่อสายปั้มเด็ดขาด**
- * นำอุปกรณ์ทุกชิ้นขึ้นจากน้ำทันทีที่ต้มเสร็จ ระวังน้ำร้อนลวกมือ ควรใช้ที่คีบคีบอุปกรณ์ออกมาจากน้ำร้อน
- * ผึ่งให้แห้ง หรือเช็ดด้วยผ้าสะอาด ก่อนประกอบใหม่ทุกครั้ง
- * กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้นแห้งสนิทก่อนการใช้ประกอบใหม่ทุกครั้ง เนื่องจากความชื้นจะมีผลต่อการทำงานของเครื่องปั้ม

การทำความสะอาดก่อนการใช้งานทุกครั้ง:

- * ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอุ่นก่อนจับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดอุปกรณ์การปั้มน้ำนมผ่านการทำความสะอาดและแห้งสนิท
- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายปั้มไม่มีไอน้ำหรือความชื้นค้างอยู่ **ห้ามใช้งานเครื่องปั้มน้ำนมหากมีไอน้ำหรือความชื้นค้างอยู่ในสายปั้ม**


ข้อแนะนำการทำความสะอาดทั่วไป

 **คำเตือน:** กรุณาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดวาล์วและเมมเบรน หากชำรุดเสียหาย เครื่องปั้มอาจทำงานได้ไม่ปกติ

 **คำแนะนำพิเศษสำหรับการทำความสะอาดวาล์วและเมมเบรน:**

ตัวเมมเบรนได้รับการออกแบบเป็น พิเศษให้มีปุ่มเล็กๆ บนก้านสำหรับจับได้สะดวกเวลานำมาทำความสะอาด

เมื่อจะทำความสะอาดวาล์วและเมมเบรน ให้ดึงส่วนเมมเบรนออกมาจากวาล์วพอให้มีการกระตุกออก แต่ไม่ดึงออกจนสุด ล้างเมมเบรนและวาล์วด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ แล้วล้างฟองออกให้หมดด้วยน้ำอุ่น หลังจากล้างเสร็จแล้ว ให้กดส่วนก้านกลับเข้าไปที่วาล์ว โดยให้แผ่นเมมเบรนวางแนบไปกับตัววาล์วดังภาพ

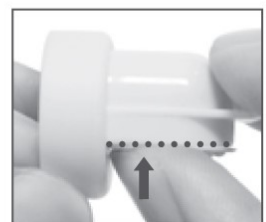

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์

- * ในการใช้งานปกติ สายปั๊มและข้อต่อไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด เพราะไดอะแฟรมจะทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนของน้ำมันเข้าไปในสายปั๊ม
- * อุปกรณ์ทุกชิ้นของชุดกรวยปั๊มและชุดไดอะแฟรมสามารถทำความสะอาดได้ในเครื่องล้างจานส่วนบน หรือนำมาล้างด้วยมือ
- * ห้ามใช้น้ำยาที่มีสารละลายหรือสารกัดกร่อนล้างอุปกรณ์
- * ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
- * ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดมอเตอร์

ข้อแนะนำการทำความสะอาดสายปั๊ม:

- * เช็ดที่ผิวด้านนอกของสายปั๊มด้วยผ้าสะอาดที่บิดหมาดๆ ระวังอย่าให้น้ำหรือของเหลวใดๆ เข้าไปข้างในสายปั๊ม
- * ถ้าหากพบว่ามีน้ำหรือของเหลวเข้าไปในสายปั๊ม ล้างสายปั๊มด้วยน้ำร้อนสะอาด แขนงให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้งาน ห้าม สอดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าข้างในสายปั๊ม

ข้อควรระวัง :



ก่อนการใช้งานในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ มีรอยแตก ร้าว หรือฉีกขาด เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำมัน Rumble Tuff ลดลง ในกรณีที่พบการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ให้หยุดใช้งานจนกว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้ว

คำเตือน : ห้ามนำชุดกรวยปั๊มไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็ง เพราะจะทำให้อุปกรณ์แตกร้าวและเสื่อมสภาพ



สแกน QR Code นี้เพื่อดูวิธีการประกอบเครื่องปั๊มน้ำมัน Rumble Tuff
ได้บนโทรศัพท์มือถือ หรือได้ที่ www.rumbletuff.com

คำอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับ Rumble Tuff Breeze

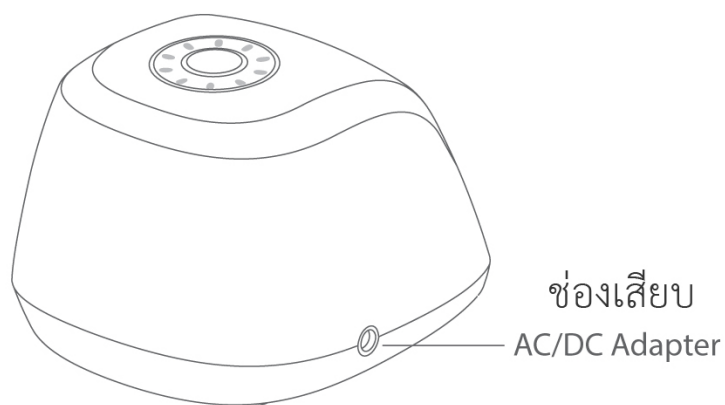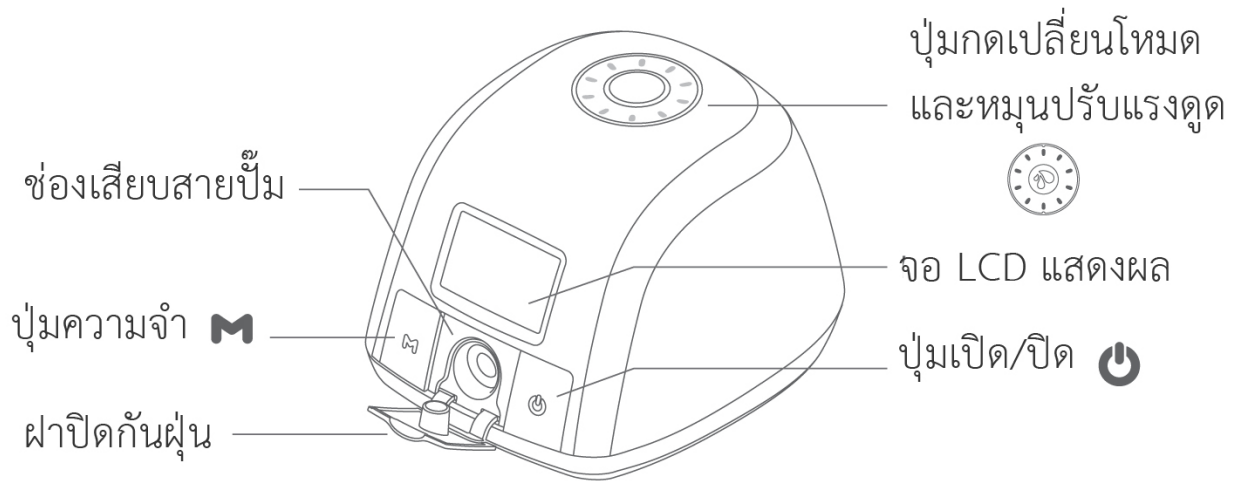

หน้าจอแสดงผล


วิธีการใช้งานเครื่องปั๊มไฟฟ้า Rumble Tuff Breeze



แนบชุดกรวยปั๊มเข้ากับหน้าอก จัดตำแหน่งหัวนมให้อยู่กึ่งกลางกรวยปั๊ม




1. เปิดฝาปิดกันฝุ่นด้านหน้าเครื่องปั๊ม

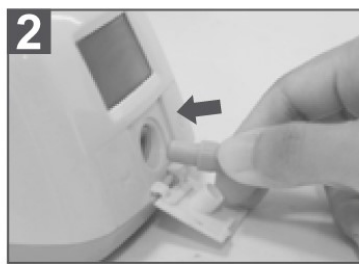

2. เสียบสายปั๊มด้านที่มีตัวต่อเข้ากับช่องลมตรงกลาง



4. กดปุ่มเปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการทำงาน 

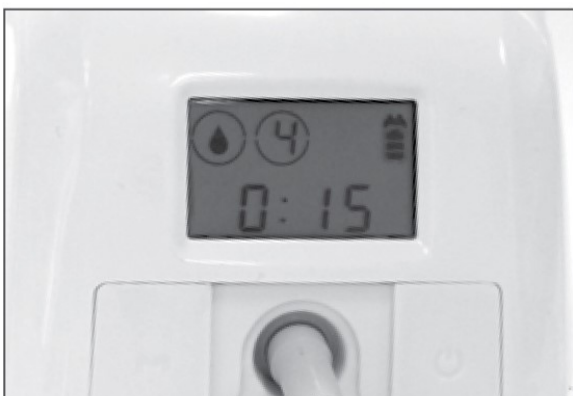

5. หน้าจอ LCD จะแสดงเวลาที่ปั๊มครั้งล่าสุดเป็นเวลา 2-3 วินาที แล้วจึงเริ่มทำงานในโหมด Reflex 15 วินาที และเปลี่ยนเป็นโหมดกระตุ้นโดยอัตโนมัติ


วิธีการใช้งานเครื่องปั๊มไฟฟ้า Rumble Tuff Breeze



ปรับแรงดูดตามต้องการด้วยการหมุนปุ่ม  ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงดูด และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดแรงดูด




คุณแม่สามารถเลือกที่จะใช้โหมดกระตุ้น  ไปตลอดระยะเวลาการปั๊ม หรือเปลี่ยนเป็นโหมดปั๊มปกติ  ด้วยการกดปุ่ม  ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล

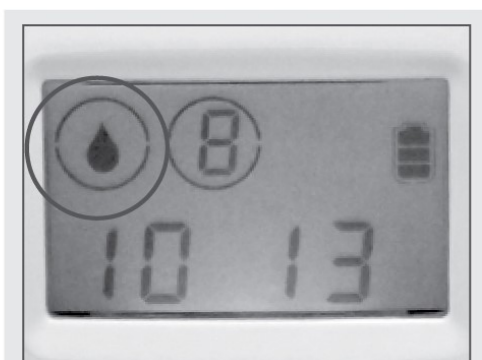

สามารถตรวจสอบสถานะของโหมดการปั๊มได้จากหน้าจอแสดงผล

 รูปหยดเดียว แสดงว่าเครื่องทำงานในโหมดกระตุ้น

 รูปสองหยด แสดงว่าเครื่องกำลังทำงานในโหมดปั๊มปกติ

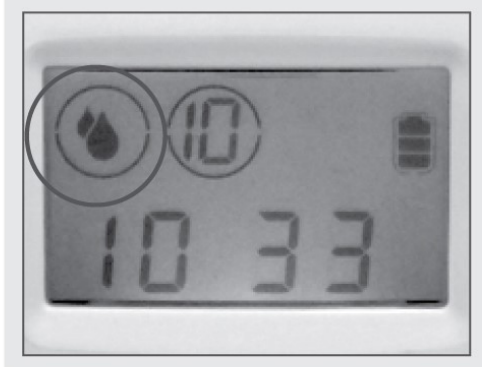

โหมดกระตุ้นสามารถปรับความแรงได้ 8 ระดับ

โหมดปั๊มปกติสามารถปรับความแรงได้ 10 ระดับ



เมื่อสิ้นสุดการปั๊ม กดปุ่ม  เพื่อปิดเครื่อง

วิธีการใช้งานเครื่องปั๊มไฟฟ้า Rumble Tuff Breeze



หลังจากปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงระยะเวลาในการปั๊ม
ล่าสุดประมาณ 2-3 วินาที แล้วจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกา
แสดงเวลา หรือแสดงเวลาตั้งเดือน ตามที่ตั้งไว้



หลังจากใช้งานเครื่องปั๊มเสร็จแล้ว ควรปิดฝากันฝุ่นด้านหน้าทุกครั้ง



ข้อควรระวัง:

- * ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดูดในขณะที่ถอดกรวยปั๊มออกจากเต้านม ถ้าจำเป็น สามารถถอดนิ้วแทรก
ระหว่างกรวยปั๊มและเต้านมเพื่อคลายแรงดูด ในลักษณะเดียวกับที่ถอนปากทาร์กออกจากเต้า
- * เพื่อความปลอดภัย เครื่องปั๊มนม Rumble Tuff จะหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อครบ 30 นาที

ระดับแรงดูด

เมื่อคุณแม่ได้ปรับระดับแรงดูดแล้ว (ทั้งโหมดกระตุ้นและโหมดปั๊มปกติ) เครื่องปั๊มนม Rumble Tuff จะจำ
ระดับแรงดูดที่ปรับครั้งสุดท้ายไว้ในเครื่องจนกว่าจะมีการปรับใหม่ ฟังก์ชันนี้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานเป็นประจำ
โดยที่คุณแม่ไม่จำเป็นต้องปรับแรงดูดใหม่ในทุกครั้งที่ปั๊มนม

การปรับระดับแรงดูด:

1. สำหรับโหมดกระตุ้นน้ำนม คุณแม่สามารถปรับระดับแรงดูด โดยการหมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับ
ความแรง หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับแรง สามารถปรับได้ตามต้องการ ให้อยู่ในระดับที่คุณแม่รู้สึก
สบายที่สุด
2. สำหรับโหมดปั๊มปกติ คุณแม่ควรปรับระดับแรงดูดให้ที่ได้น้ำนมมากที่สุดแต่ยังคงรู้สึกสบายและไม่ทำให้
รู้สึกเจ็บ โดยการหมุนปุ่มปรับตามต้องการ

ปุ่ม M (My Favorite Pattern)

คุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งของเครื่องปัมน้ำนม Rumble Tuff Breeze ก็คือปุ่ม M (My Favorite Pattern) ทุกครั้งที่ปัมนม คุณแม่สามารถกดปุ่ม M เพื่อเรียกวิธีการปั๊มและปรับเวลาเปลี่ยนโหมดแบบที่ชอบโดยไม่ต้องหมุนปรับเองใหม่ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับกรณีที่คุณแม่ใช้โหมดปั๊มปกติเวลาปั๊ม แต่ถ้าหากคุณแม่ถนัดใช้โหมดกระตุ้นอย่างเดียวเวลาที่ปั๊ม คุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่มนี้

วิธีการตั้งค่าปุ่ม M เพื่อเปลี่ยนโหมดปั๊มอัตโนมัติ

1. หลังจากการปัมน้ำนมมาแล้วสักระยะหนึ่ง คุณแม่ก็จะทราบถึงเวลาที่น้ำนมเริ่มหลัง (let down) ของตัวเอง ซึ่งมักจะเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันในการปัมนมแต่ละครั้ง
2. เริ่มจากการปั๊มปกติ ซึ่งเครื่องปั๊มจะเริ่มที่โหมดกระตุ้นแบบรีเฟล็กซ์ 15 วินาที แล้วปรับเองอัตโนมัติไปที่โหมดกระตุ้นแบบเร็วที่ระดับแรงดูดที่คุณแม่ใช้ครั้งสุดท้าย
3. เมื่อน้ำนมเริ่มหลัง (Let-down) ให้กดปุ่มรูปหยดน้ำ  เพื่อปรับเข้าสู่โหมดปั๊มปกติแบบธรรมชาติ ปรับความแรงของการดูดตามต้องการ
4. กดปุ่ม M ค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่งรูปไอคอน M กระพริบขึ้นที่หน้าจอ  ซึ่งแสดงว่าการตั้งค่าเวลาสำหรับการเปลี่ยนโหมดปั๊มสำเร็จแล้ว
5. ทำการปัมน้ำนมต่อไปจนเสร็จ

วิธีการปัมน้ำนมโดยใช้โหมด M ที่ตั้งไว้

1. เปิดเครื่องปั๊ม
2. กดปุ่ม M (ห้ามกดค้างเกินกว่า 3 วินาที)
3. เครื่องปั๊มจะเปลี่ยนจากโหมดกระตุ้นเป็นโหมดปั๊มปกติตามเวลาที่ตั้งไว้ในโหมดปุ่ม M โดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: คุณแม่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแรงดูดหรือสลับไปมาระหว่างโหมดกระตุ้นและโหมดปั๊มปกติได้ขณะที่ใช้โหมดปุ่ม M อยู่ หากต้องการปรับเปลี่ยน ให้กดปุ่ม M เพื่อหยุดการทำงาน

วิธีการตั้งนาฬิกา

วิธีการตั้งเวลา:

1. เมื่ออยู่ในโหมดนาฬิกา/stand by ให้กดปุ่ม M ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดการตั้งนาฬิกา จะมีเสียงบีบดังขึ้น พร้อมกับสัญลักษณ์ AM/PM กระพริบ
2. หมุนปุ่มปรับแรงดูด  ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกกระหว่าง AM/PM
3. กดปุ่มเปลี่ยนโหมด  เพื่อเปลี่ยนจากโหมด AM/PM ไปที่การตั้งชั่วโมง ตัวเลขหลักชั่วโมงจะกระพริบ
4. หมุนปุ่มปรับแรงดูด  ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกตัวเลขชั่วโมง
5. กดปุ่มเปลี่ยนโหมด  เพื่อเปลี่ยนจากหน่วยชั่วโมงเป็นหน่วยนาที ตัวเลขหลักนาทีจะกระพริบ
6. หมุนปุ่มปรับแรงดูด  ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกตัวเลขนาที
7. กดปุ่มเปลี่ยนโหมด  เพื่อบันทึกการตั้งค่า

หมายเหตุ : ในโหมดการตั้งนาฬิกา หากไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ภายใน 10 วินาที เครื่องปั๊มจะบันทึกการตั้งค่าอัตโนมัติและเครื่องปั๊มจะกลับไปยัง โหมดนาฬิกา/stand by

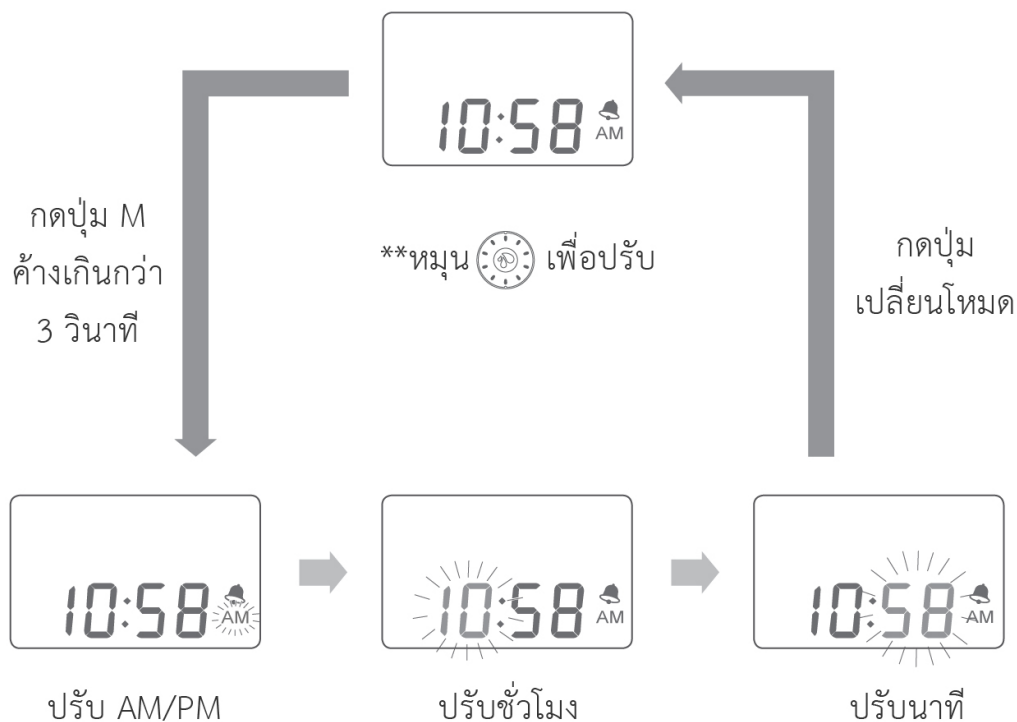

วิธีการตั้งเวลาเตือน

การปัมน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาปริมาณน้ำในร่างกายผลิตให้คงที่ โหมดตั้งเตือนเวลาปัมน้ำนมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณแม่ปัมน้ำนมได้อย่างสม่ำเสมอ หลังจากตั้งช่วงห่างของเวลาปัมน้ำแต่ละครั้งไว้แล้ว นาฬิกาจะเริ่มนับเวลาถอยหลังอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการปัมน้ำครั้งล่าสุด และจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องปัมน้ำครั้งต่อไป

วิธีตั้งการเตือน:

1. เมื่ออยู่ในโหมดนาฬิกา/stand by ให้กดปุ่ม M หนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดการตั้งเตือนเวลา
2. หน้าจอจะแสดงเวลาสลับกันระหว่าง "ช่วงห่างของเวลาปัมน้ำแต่ละครั้ง" (มีตัวเลขบอกชั่วโมงและนาฬิกา) และ "เวลาที่ต้องปัมน้ำครั้งถัดไป" (ตัวเลขบอกเวลาและ AM/PM)
3. หมุนปุ่มปรับแรงดูด  ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับช่วงห่างของเวลา ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือลดครั้งละ 15 นาที เวลาเตือนครั้งถัดไปจะคำนวณจากเวลาที่ใช้น้ำนมไปจนกระทั่งเริ่มการปัมน้ำนมครั้งถัดไป
หมายเหตุ : ช่วงห่างของเวลานี้จะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เริ่มปัมน้ำนมไปจนกระทั่งเริ่มการปัมน้ำนมครั้งถัดไป ไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่สิ้นสุดการปัมน้ำนมครั้งที่ผ่านมาจนถึงครั้งถัดไป
4. กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด เปิด/ปิด การตั้งเตือน
5. หมุนปุ่มปรับแรงดูด  ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด การตั้งเตือน
6. กดปุ่ม  อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

หมายเหตุ : ขณะที่อยู่ในโหมดการตั้งเตือนเวลา ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ ภายใน 10 วินาที เครื่องจะบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน และจะกลับไปสู่โหมดนาฬิกา/stand by โดยอัตโนมัติ



แหล่งจ่ายไฟ

เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าสามารถทำงานได้จากแหล่งจ่ายไฟดังนี้:

การใช้ AC Adapter (มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)



เสียบ AC Adapter เข้ากับเต้าเสียบ



เสียบสายไฟเข้ากับมอเตอร์

ข้อควรระวัง:




เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Ac Adapter ผู้ใช้ต้องใช้ AC Adapter ที่มากับเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้าเครื่องนี้เท่านั้น การใช้ Adapter อื่นๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือผู้ใช้ และจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

แหล่งจ่ายไฟ

การใช้ถ่านลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้ที่มากับตัวเครื่องปั๊ม

เครื่องปั๊ม Rumble Tuff Breeze มาพร้อมกับถ่านชาร์จได้ชนิดลิเธียมไอออน (Li-ion)

- * ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จถ่านให้เต็มก่อน เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- * เมื่อเสียบปลั๊ก ถ่านจะได้รับการชาร์จทันที แต่เมื่อเปิดเครื่องปั๊มให้ทำงาน จะหยุดการชาร์จถ่านไว้ คุณแม่สามารถใช้เครื่องปั๊มได้เวลาเสียบปลั๊ก
- * หลังจากการชาร์จครั้งแรก การชาร์จครั้งถัดไปจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
- * เพื่อเป็นการถนอมถ่านชาร์จ พยายามรักษาระดับแบตเตอรี่ให้เต็มไว้เสมอ ทำการชาร์จซ้ำก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเกลี้ยง
- * เก็บเครื่องปั๊มไว้ในที่เย็น ไม่ร้อนจัดเกินไป
- * ถ้าหากว่าเก็บเครื่องปั๊มไว้ในที่ร้อนเกินไป แล้วนำมาใช้งานด้วยถ่านชาร์จ (ไม่เสียบปลั๊ก) เครื่องปั๊มอาจจะไม่เริ่มทำงานทันที กรณีนี้ ต้องรอให้ถ่านเย็นตัวลงก่อนและใช้งานแบบเสียบปลั๊กไปก่อน

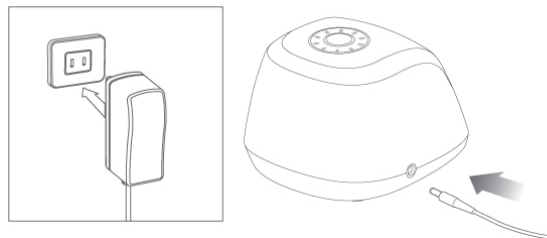

หมายเหตุ:

- * ถ่านชาร์จชนิดลิเธียมไอออนในเครื่องปั๊มนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออาการไหม้จากสารเคมีในถ่านได้ หากใช้อย่างไม่ถูกวิธี
- * ห้ามแยกชิ้นส่วนถ่านชาร์จ หากต้องทิ้ง ต้องทำการทิ้งในที่ที่จัดไว้พิเศษสำหรับถ่านชนิดนี้เท่านั้น
- * ห้ามวางถ่านชาร์จไว้ใกล้แหล่งความร้อนหรือกองไฟ ห้ามทิ้งถ่านชาร์จลงกองไฟ
- * เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- * ห้ามเปิดเครื่องปั๊มเพื่อเปลี่ยนถ่านชาร์จหรือเหตุผลใด ๆ การกระทำดังกล่าวมีผลทำให้ขาดประกัน

สัญลักษณ์แสดงสถานะแบตเตอรี่



เสียบปลั๊กไฟอยู่



แบตเตอรี่หมด ได้เวลาชาร์จ (กระพริบ)



ระดับแบตเตอรี่



แบตเตอรี่หมด ต้องชาร์จอย่างน้อย 6 ชม. (กระพริบ)




รักษาระดับแบตเตอรี่ให้ได้อย่างน้อย 50% เสมอ และเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง (20-25 c) เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน

แนะนำให้ชาร์จถ่านซ้ำทุก 3 เดือนเพื่อป้องกันการปล่อยประจุมากเกินไป

ประสิทธิภาพของถ่านชาร์จจะลดลงเรื่อยๆ หลังจากใช้งานหรือเก็บทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ปั๊มมือ

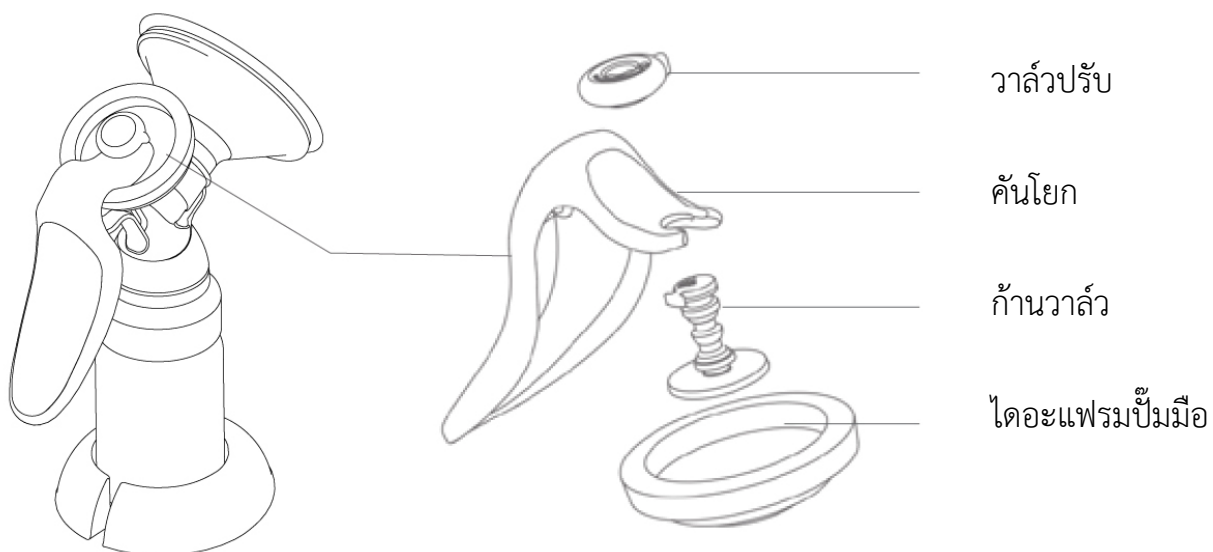


วิธีประกอบชุดอุปกรณ์สำหรับปั๊มมือ

ดูวิธีการประกอบกรวยและวาล์ว เมมเบรนได้ที่หน้า 8-10




วิธีประกอบชุดอุปกรณ์สำหรับปั๊มมือ

3-1

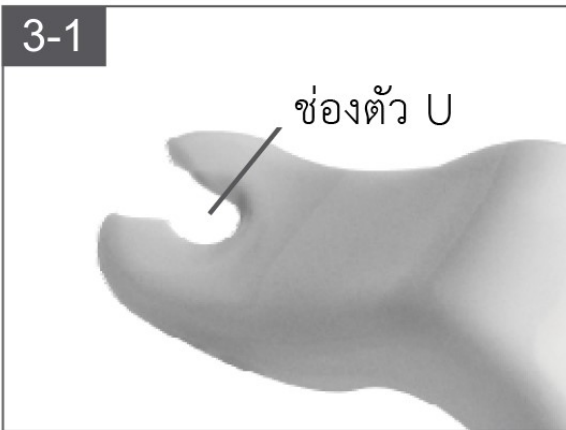

ต่อส่วนที่เป็นช่องรูปตัว U ของคันโยกเข้ากับร่องของ
ก้านวาล์ว หรือ Valve Stem

3-2

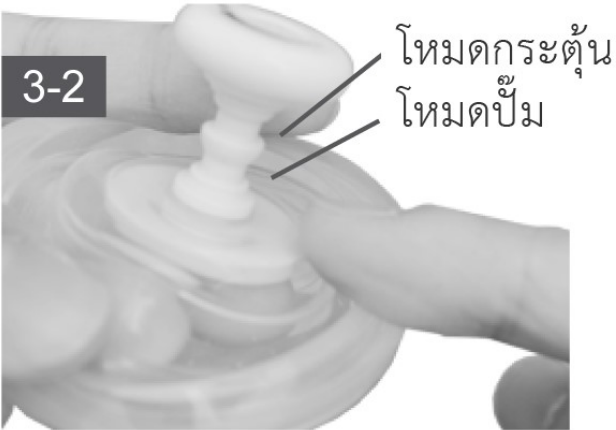


ร่องของก้านวาล์วนี้จะมีอยู่สองตำแหน่ง ตำแหน่งบน
สำหรับโหมดกระตุ้น ส่วนตำแหน่งล่างสำหรับโหมดปั๊ม
ปกติ

3-3




4

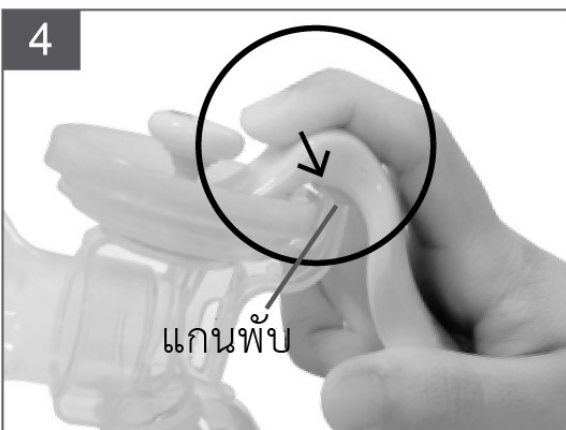

กดคันโยกลงบนแกนปั๊มของชุดกรวยให้เข้าล็อคตามรูป

การใช้งานที่ปั้มน้ำนมด้วยมือ


หมายเหตุ: คุณแม่สามารถต่อคันโยกของที่ปั้มนแบบใช้มือนี้เข้ากับร่องของก้านวาล์วได้สองตำแหน่ง โดยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งร่องที่ต่อด้วยการดันก้านวาล์ว (Valve Stem) ออกจากคันโยก แล้วต่อเข้าไปยังอีกร่องที่ต้องการ

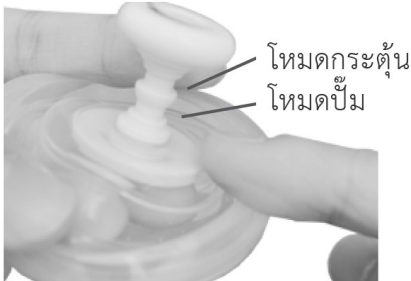


- ร่องด้านบนสำหรับโหมดกระตุ้นเพื่อให้กลไกการหลังน้ำนมทำงาน
- ร่องด้านล่างสำหรับโหมดปั้มน้ำนมปกติ เมื่อน้ำนมเริ่มหลั่ง



แนบกรวยปั้มเข้ากับเต้านม โดยให้หัวนมอยู่ตรงกลางด้านในของกรวยปั้ม แล้วกดคันโยกลงเพื่อทดสอบแรงดูด

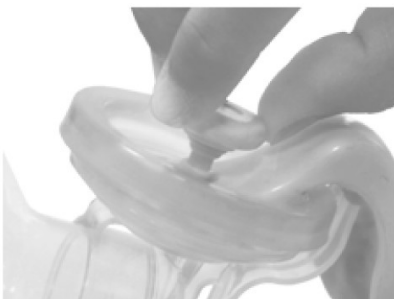

สามารถปรับระดับแรงดูดได้ตามต้องการ ด้วยการหมุนปุ่มที่อยู่ด้านบนของก้านวาล์ว โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มแรงดูด และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดแรงดูด

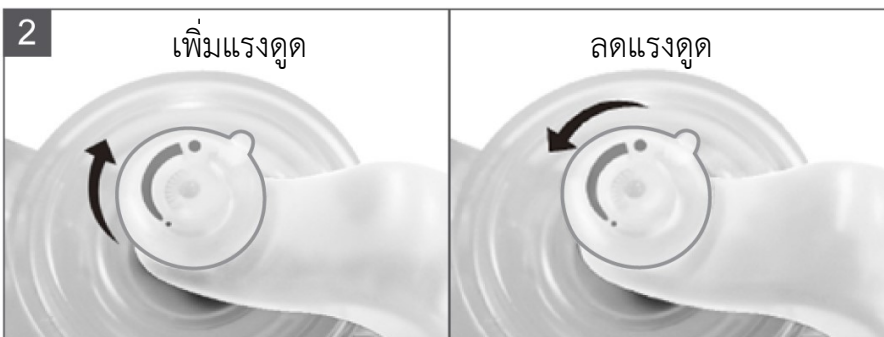

หมายเหตุ: อย่าหมุนปุ่มปรับวาล์วจนเกินรอบ เพราะจะทำให้เกิดช่องอากาศรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาแรงดูด ถ้าปุ่มปรับไม่เข้าที่ ให้ลองหมุนกลับไปกลับมา 2-3 ครั้ง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หากพบปัญหาขัดข้องทางไฟฟ้าอาจเนื่องมาจากไฟตกหรือจากสาเหตุอื่นๆ ในระหว่างที่ใช้งานเครื่องปั้มน้ำนมไฟฟ้า Rumble Tuff ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ถอดสาย AC Adapter จากเต้าเสียบแล้วรอประมาณ 5 วินาที
- เสียบสาย AC Adapter ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- หากยังใช้การไม่ได้ ให้ลองเสียบเต้าเสียบอันอื่นๆ แทน

พลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุมีปัญหา

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้กำเนิด ใช้ และ แผ่พลังงานคลื่นวิทยุได้ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคู่มือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ หากพบปัญหาผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนี้

- เคลื่อนย้ายอุปกรณ์อื่นๆ ให้ห่างจากผลิตภัณฑ์
- แยกอุปกรณ์อื่นๆ ออกจากผลิตภัณฑ์
- แยกใช้เต้าเสียบสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โดยไม่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ปรึกษาผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ
- โปรดทำความเข้าใจ ว่าไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดปัญหาคลื่นความถี่วิทยุได้

แรงดูดลดลง

ถ้าแรงดูดลดลงเพียงข้างเดียว ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเครื่องปั้ม:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบชุดอุปกรณ์ปั้มอย่างถูกต้อง (ดูหน้า 8)
- วางกรวยให้หัวนมอยู่กึ่งกลางและกรายแนบสนิทกับเต้านมโดยรอบ
- วางไดอะแฟรมลงบนถ้วยให้แน่น ตรวจสอบว่าไม่รั่ว และวางถูกตำแหน่ง (ดูหน้า 10)
- ตรวจสอบว่าวาล์วและเมมเบรนว่ามีรอยฉีกขาดหรือรูโหว่หรือมันตันหรือไม่ เพราะวาล์วเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการดูด หากวาล์วชำรุดเสียหาย ให้เปลี่ยนอันใหม่ (มีสำรองให้ 1 อัน)

ถ้าแรงดูดลดลงทั้งสองข้าง:

- ถอดสายปั้มออกจากช่องลมด้านหลังมอเตอร์ แล้วใช้นิ้วมือปิดช่องลม
 - ⇒ หากยังรู้สึกถึงแรงดูด แสดงว่ามอเตอร์ยังทำงานได้ปกติ
 - ⇒ หากไม่รู้สึกถึงแรงดูด หรือรู้สึกได้ว่าแรงดูดลดลงอย่างมาก ให้ติดต่อร้านนมแม่ทันที
- ตรวจสอบท่อสายยางดูรอยขาดรั่ว ว่ามีหรือไม่

ไม่มีการตอบสนองเมื่อปรับหมุนปั้ม

ถ้าหากว่าเครื่องปั้มทำงานอยู่ในโหมด M (My Favorite Pattern) คุณแม่จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนระดับแรงดูดหรือปรับเปลี่ยนจากโหมดกระตุ้นเร็วๆ กับโหมดปั้มปกติได้ ถ้าต้องการจะออกจากโหมด M (My Favorite Pattern) ให้กดปุ่ม M ซ้ำ จะสามารถหมุนปรับปั้มได้ตามต้องการอีกครั้ง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

เครื่องปั๊มไม่ทำงานขณะที่เปิดสวิตช์แล้ว

ถ้าหากว่าสัญลักษณ์รูปถ่าน  กระพริบ หรือมีคำว่า Err1 ขึ้นมา และได้ยินเสียงเตือนดังบี๊บๆ (4 ครั้ง) เมื่ออยู่ในโหมดตั้งเวลา (Alarm ON) ให้ติดต่อร้านนมแม่

น้ำนมไหลเข้าไปสะสมในส่วนลำตัวของกรวยปั๊ม

ถ้าระหว่างปั๊มพบว่าน้ำนมไหลลงขวดได้ไม่ทัน ให้ลดแรงดูดลงเพื่อให้น้ำนมระบายลงไปก่อน แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มแรงดูดขึ้นใหม่

สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมและอะไหล่ได้ที่ไหน

ตัวแทนจำหน่าย Rumble Tuff ของร้านนมแม่ทุกสาขา หรือทางช่องทางต่อไปนี้

- www.nommaeshop.com
- www.facebook.com/rumbltuffthailand
- โทร: 02-184-8165, 02-322-8447

คำแนะนำ:

- ถ้ารู้สึกเจ็บในขณะปั๊ม ลดแรงดูดให้น้อยลง สำหรับผู้ที่เริ่มปั๊มใหม่ๆ ไม่ควรใช้เวลาปั๊มนานเกินไป หากรู้สึกเจ็บควรหยุดปั๊มทันที
- บางกรณี การปั๊มโดยถอดซิลิโคนเสริมกรวยปั๊มออกก็ช่วยลดอาการเจ็บลงได้
- ถ้าหากลองทำวิธีข้างต้นแล้วยังคงเจ็บอยู่ ให้หยุดปั๊ม นำกรวยออกจากเต้า พักสัก 2-3 นาที ถ้ายังรู้สึกเจ็บค้างอยู่ในเต้านม ให้ติดต่อร้านนมแม่ 02-184-8165 หรือปรึกษาศูนย์นมแม่ทันที

โปรดติดต่อร้านนมแม่ หากมีอาการเจ็บในขณะปั๊ม หรือมีปัญหาอื่นๆ

“เราจะช่วยให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้”



วางเครื่องปั๊มในที่ที่สามารถเข้าถึงปลั๊กและเต้าไฟได้สะดวก กรณีที่อาจต้องถอดปลั๊กกะทันหัน



สแกน QR Code นี้เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องการแก้ไขปัญหาการปั๊มนม
ด้วยเครื่องปั๊ม Rumble Tuff

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น บริษัทขอรับประกันผลิตภัณฑ์เครื่องปัมน้ำไฟฟ้า Rumble Tuff เป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายสำหรับชิ้นส่วนของมอเตอร์ (ไม่รวมชุดอุปกรณ์ปั๊ม) การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้ซื้อ ขายหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ เครื่องปัมน้ำไฟฟ้า Rumble Tuff ให้ผู้อื่น

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตกหล่น การใช้งานผิดประเภท การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ หรือใช้ไฟผิดขนาด

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้น บริษัทยินดีที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดย Rumble Tuff เท่านั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของ Rumble Tuff จะทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะทันที

ข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องปั๊มนม Rumble Tuff Breeze

พลังงาน

- AC/DC Adapter (รวมอยู่ในกล่อง) 100V-240V AC, 50/60 Hz, 0.4A
- Dc 9V/1.3A Output
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 7.4V 2200mAh

คุณลักษณะทางเทคนิค

- แรงดูด
 - ⇒ โหมดกระตุ้น -75—179 mmHg (-10—24 kpa)
 - ⇒ โหมดปั๊ม -75—285 mmHg (-10—38 kpa)
- Ambient Temperature range: +10 C- 40 C (50 F—104 F)
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20% - 80%

สัญลักษณ์

-  Type BF equipment (Breastshield)
-  Consult instructions for use
-  Disposal of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
-  Medical CE

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รายชื่อเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- * www.breastfeedingthai.com
- * www.thaibreastfeeding.org

รายชื่อเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- * breastfeedingthai -> www.facebook.com/BreastfeedingThai
- * นมแม่ -> www.facebook.com/thaibreastfeeding
- * พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ -> www.facebook.com/SuthiRaXeuxPhirocnKic
- * นมแม่ แบบแฮปปี้ -> www.facebook.com/HappyBreastfeeding
- * มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย -> www.facebook.com/Thai bf
- * ร้านนมแม่ -> www.facebook.com/NommaeShop

ศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศิริราช โทร. 02-419-7000 ต่อ 5995
- * คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กฯ โทร.02-354-8333 ต่อ 502
- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-289-7000 ต่อ 7134 (จ-ศ) ต่อ 7130 (ส.-อา.)
- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต โทร. 076-361-234 ต่อ 1244
- * คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. 044-615-002 ต่อ 3551
- * ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-521-3064, 02-521-3066
- * ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี โทร. 036-300-830-32
- * ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร. 038-786-974-7
- * ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โทร. 032-337-509
- * ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โทร. 044-291-677
- * ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น โทร. 043-243-210
- * ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โทร. 045-288-586
- * ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ โทร. 056-255-451
- * ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โทร. 055-299-280
- * ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โทร. 053-276-856
- * ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โทร. 075-399-460
- * ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โทร. 073-214-200



www.facebook.com/Rumbltuffthailand

จัดจำหน่ายโดย บริษัท มัธกา จำกัด

154 ถนนร่มเกล้า ซอย 24 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-543-9322, 02-915-2277

www.rumbltuffbaby.com